

奇美醫院病理中心檢驗資訊表

更新日期：105 年 04 月 02 日

QP0701-01

檢驗項目名稱	<b>Finger stick AC</b> <b>Finger stick PC</b>		計價碼	09005-2 09005-5	
檢體種類	血液		檢體量	0.6µl	
採檢適用容器	使用指尖血。黃頭管、綠頭管、紫頭管血液亦可，但需注意血液不能凝固				
禁食限制	視病人當時的狀況給予報告		加作檢驗	無	
採檢注意事項	1. 血量必須要夠試紙反應 2. 如果用試管血，必須於抽血後 30 分鐘內操作使用。 3. 含有氟(fluoride)之添加物嚴禁使用；如：灰頭管。				
檢驗儀器	ACCU-CHEK Performa 血糖機				
檢驗方法	儀器：電化學法 試紙：Mut.Q-GDH 酵素法				
檢驗試劑	羅氏優勝血糖機專用試紙				
報告完成時間	5 秒				
生物參考區間	一 空腹血糖值 (AC Sugar) 為 70~100mg/dl。 一 飯後 2 小時血糖值 (PC Sugar) 為 < 130mg/dl。	危險臨界值	成人	< 50 mg/dL	> 500 mg/dL
			兒童(12 歲以下)	< 50 mg/dL	> 300 mg/dL
			新生兒 (一週內)	< 40 mg/dL	> 200 mg/dL
臨床意義	糖尿病是最常見高血糖者之病因，因胰島素分泌不足或昇糖素分泌過多或胰島素功能受到抑制，其結果將導致醣類代謝異常，繼之將導致脂肪與蛋白質代謝失常。				
干擾因素	無				
操作組別/分機	臨床服務組 53283				
委外代檢	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 委外代檢 代檢機構： _____ 聯絡電話： _____ 地址： _____				
備註	無				