


精準醫學核心實驗室檢驗資訊表

更新日期：2023年11月04日

PM.QP004-01

檢驗項目名稱	血癌-FLT3-ITD (1 片段)		計價碼	16945
檢體種類	骨髓/血液		檢體量	10 mL
採檢適用容器	大紫頭管(含 EDTA 抗凝固劑) 			
禁食限制	無	加作檢驗	不適用	
採檢注意事項	1. 血液 blast 需大於 20%，若小於 20%將導致偵測靈敏度降低 2. 若無法當天送達，請保存在 4°C 冰箱，三天內送達實驗室			
輸送條件	1. 永康院區內：常溫，24 小時內送至實驗室；4°C 保存，三天內送達實驗室 2. 非永康院區：常溫，24 小時內送至實驗室；4°C 保存，三天內送達實驗室			
檢驗儀器	ABI Veriti PCR machine、核酸定序儀			
檢驗方法	聚合酶連鎖反應、核酸定序			
檢驗試劑	2X HotStart Taq PCR MasterMix			
報告完成時間	14 個工作天			
生物參考區間	Not detected	危險臨界值	無	
臨床意義	FLT(FMS-like tyrosine kinase 3)屬於 receptor tyrosinekinase class III family，並常在急性骨髓性白血病(AML)中表現，而 FLT3 會有一定比例發生隨機複製片段(Internal tandem duplication, ITD)突變，當病人有此類突變發生時大部分預後都不佳。			
干擾因素	Blast 小於 20%將導致偵測靈敏度降低。			
操作組別/分機	精準醫學核心實驗室/52619			
委外代檢	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 委外代檢 代檢機構：_____ 聯絡電話：_____ 地址：_____			

備註	<ol style="list-style-type: none">1. 檢測限制：Mutation Allele Frequency < 20%(LOD)，因有偽陰性之可能，若檢測後為 Not detected，報告內容會加註。2. 結果判讀：依定序範圍 Blast 比對基因型別。
----	--